
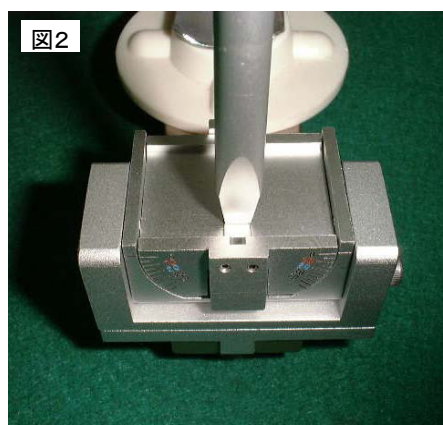


# 正中矢状面誘導要素診断・設定器 取扱説明書

## 1 取付方法

ABE咬合器に正中矢状面誘導要素診断・設定器を装着し、下図1の赤丸に囲まれた基準線にインサイザルポールを下図2のように合わせて下さい。

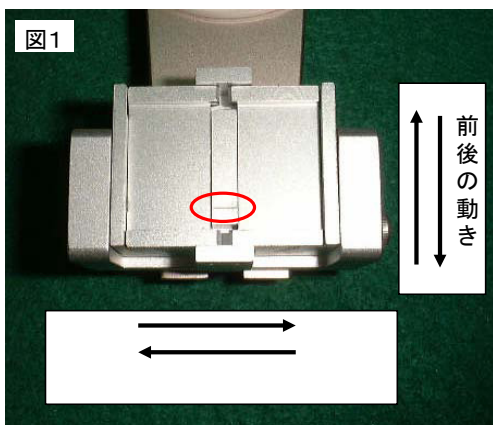

## 2 調整方法

テーブルにインサイザルポールを置いた状態で、インサイザルポールと基準線の位置がズれている場合は下記の方法でテーブル位置の調整を行って下さい。

### ① 前後にズレが生じている場合

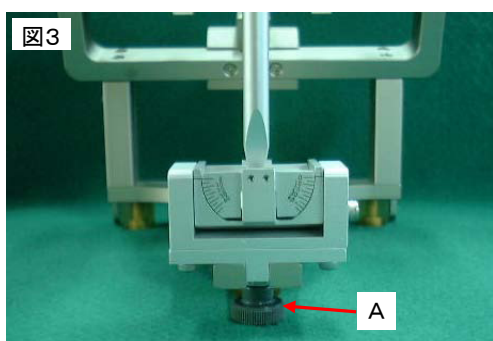


図3のA(テーブルメネジ)を緩める事でテーブルの前後調整が可能になります。

### ② 左右のズレが生じている場合

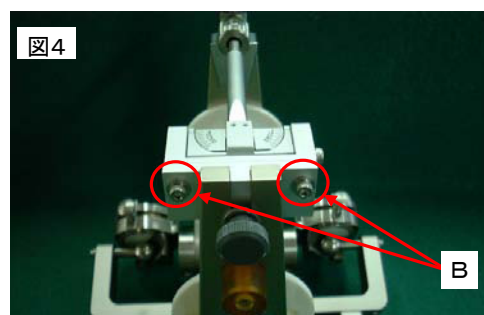


図4のB(左右調整ネジ×2)を両方緩める事でテーブルの左右調整が可能になります。

注)調整後は緩めたネジを必ず締めテーブルを固定して下さい。

# 正中矢状面誘導要素診断・設定器 申込書

※受注生産ですので納期をご確認ください。(受注数が少ない場合は納期変更あり)

医院名：	ご注文数：( )個
氏名：	様 定 価 :68,000円(税別)
ご住所：〒	様
TEL：	FAX：

発売元：株式会社クリエンテス 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-21-13 BPRレジデンス恵比寿201  
TEL:03-3441-5801 FAX:03-3441-5849  
infoa@clientes.co.jp http://www.clientes.co.jp

お申込先：FAX03-3441-5849 株式会社クリエンテス 松川