


正中矢状面誘導要素診断・設定器 取扱説明書

1 取付方法

ABE咬合器に正中矢状面誘導要素診断・設定器を装着し、下図1の赤丸に囲まれた基準線にインサイザルポールを下図2のように合わせて下さい。

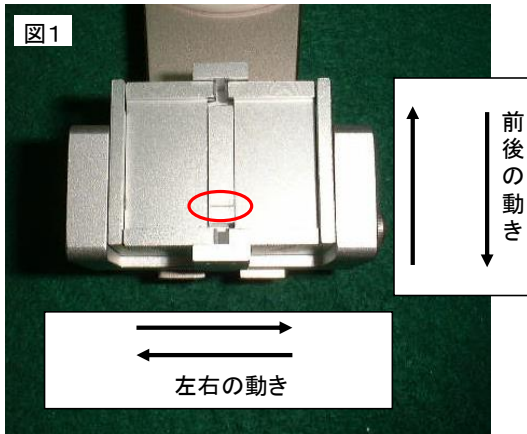

2 調整方法

テーブルにインサイザルポールを置いた状態で、インサイザルポールと基準線の位置がズレている場合は下記の方法でテーブル位置の調整を行って下さい。

① 前後にズレが生じている場合

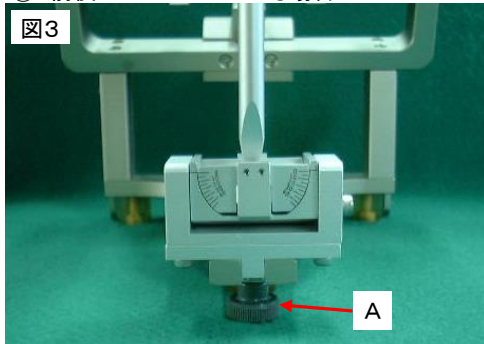


図3のA(テーブルトメネジ)を緩める事でテーブルの前後調整が可能になります。

② 左右のズレが生じている場合

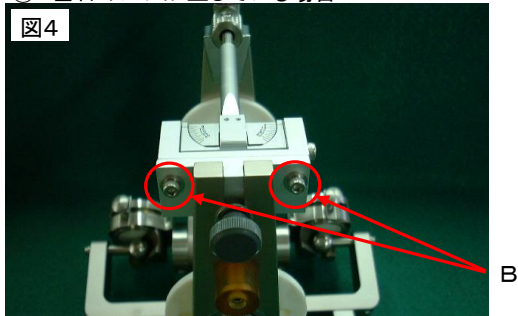


図4のB(左右調整ネジ×2)を両方緩める事でテーブルの左右調整が可能になります。

注)調整後は緩めたネジを必ず締めテーブルを固定して下さい。

発売元：株式会社クリエンテス

TEL 03-3441-5801 FAX 03-3441-5849

※受注生産になります。納期は最長半年です。(受注数が少ない場合は納期変更あり)

(2018年7月9日改定)

医院名	ご注文数()
ご住所 〒	定 価 : 68,000円(税別)
TEL :	FAX :

お申込先 : FAX 03-3441-5849 株式会社クリエンテス 松川