

オゾン水生成器 OZONE ORAL IRRIGATOR

洗浄チューブアダプタ用ホルダ取扱説明書

OZONE ORAL IRRIGATOR の洗浄チューブアダプタを本体のハンドルに固定することができます。イリゲーターを保持することができます。

洗浄用チューブ、イリゲーターは本体とは別売品です。販売店にご相談ください。



内容品



ホルダ	-----	1個
取扱説明書	-----	本書


洗浄チューブアダプタは製品本体に付属のものを使用します。

組み立て方

組み立てに必要な工具 ----- ⊕ドライバ

1 洗浄チューブアダプタのストッパをはずす


⊕ドライバで ねじ3本をゆるめて ねじとストッパをはずします。

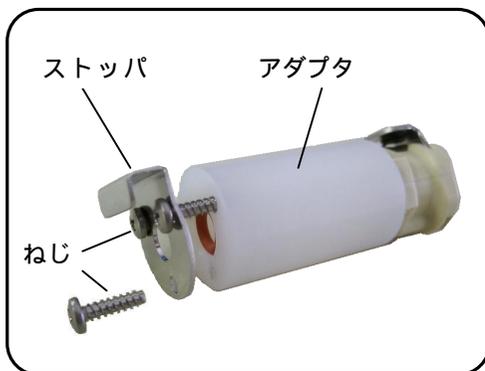

はずしたストッパは使用しません。

2 ホルダにアダプタを取り付ける

はずしたねじでホルダにアダプタを取り付けます。

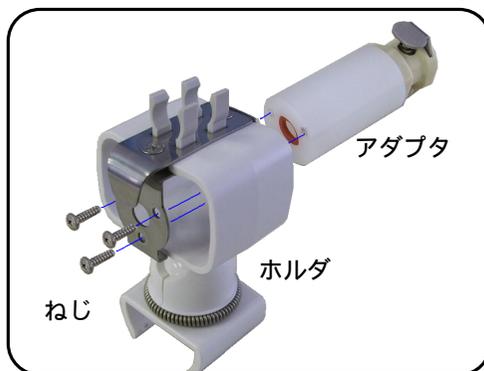

使い方

- 1** 組み立てたホルダを製品本体のハンドルに差込みます。

※洗浄用チューブの接続口を手前に向けて差込むこと。

※カチッと音がするまで入れること。




- 2** ホースと洗浄用チューブを接続します。

■ホースをカップリングに接続します。


※カチッと音がするまで入れること。

■洗浄用チューブのニードルを接続口に差し込みます。

※ニードルのツバをストッパに引っ掛けること。

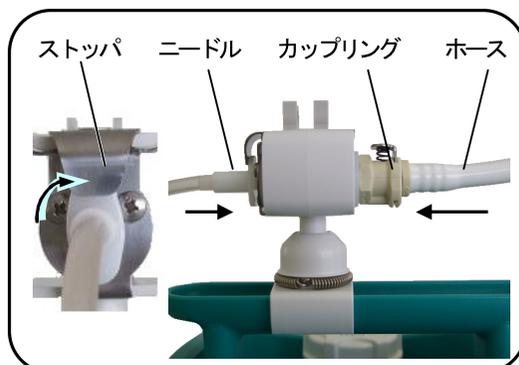

- 3** 洗浄を中断する時などは、イリゲーターを上部の4本のツメにはさんで保持できます。

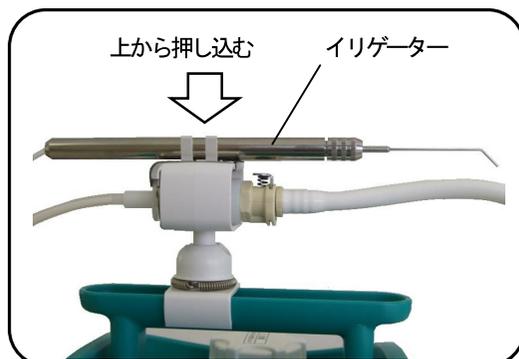

本品は保証対象外品です。また本品の使用により生じた損害(逸失利益, 人的損害, 他の装置に対する損害など)につきましても、その賠償の責を負いかねます。

販売元 **株式会社 クリエンテス**

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-21-13 BPRレジデンス恵比寿201

製造元 **柏崎ユーエステック株式会社**

〒945-0192 新潟県柏崎市藤井 1350 番地